

NOTREDAM, la digue liquide polyvalente plébiscitée par les endodontistes !

by  **ELSODENT**



UNIVERSELLE
& POLYVALENTE

NOTREDAM

EXOTHERMIE A MINIMA

pour ne pas agresser les muqueuses

COULEUR BLEUE

pour un meilleur contraste

EXCELLENTE THIXOTROPIE

pour une mise en place aisée

BIO+

NOTREDAM est formulée sans BPA, BisGMA, BisEMA, TEGDMA, ni addition d'HEMA

UNIVERSELLE & POLYVALENTE

pour des indications multiples

MULTI INDICATION

Endodontie

Compléter l'étanchéité de la digue, au niveau du collet des dents, lors de sa pose

Reconstruction temporaire des parois dentinaires manquantes pour maintenir l'irrigant en place

Dentisterie esthétique et restauratrice

Maintien en place des films de Téflon® lors du scellement de facettes ou de restaurations proximales intéressant le point de contact

Prothèse

Comblement des contre-dépouilles, avant empreinte, en cas de récessions gingivales

Blanchiment

Protection gingivale lors des séances de blanchiment au fauteuil



REFERENCES & PRESENTATIONS

ND-4 2 seringues de 1,2ml (2g) + 10 embouts jetables

ND-10 2 seringues de 3ml (5g) + 10 embouts jetables

LTL 100 embouts aiguilles noirs gauge 20

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

> LE + BIO

NOTREDAM fait partie d'une gamme de produits dentaires innovants, plus respectueuse de la santé des patients, formulée sans BPA, BisGMA, BisEMA, TEGDMA, ni addition d'HEMA. La biocompatibilité est au coeur de notre recherche !



> L'AVIS DU DENTISTE


« J'utilise NOTREDAM depuis des années en endodontie : sa thixotropie, son adhésion suffisante sur les tissus dentaires secs et surtout sa rigidité après polymérisation permettent d'améliorer l'étanchéité du champ opératoire, de monter des parois provisoires lorsqu'elles sont manquantes et de rehausser les bords de la cavité d'accès pour augmenter le volume de solution d'irrigation. Elle est indispensable dans mon exercice et permet souvent d'éviter la réalisation d'une bague de cuivre, plus chronophage. »




Dr Arnaud Stanurski
Spécialiste Endodontie &
Paro-implantologie (94)

> CAS CLINIQUE


Exemples d'utilisation de la digue liquide NOTREDAM . (Dr MAFFI-BERTHIER (Paris))

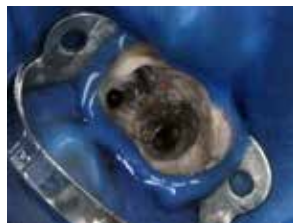

1a - 1b. Digue avant /après imperméabilisation avec NOTREDAM

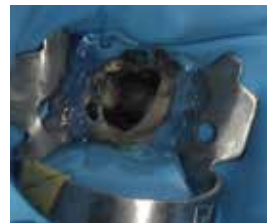

2. Polymérisation sous glycérine

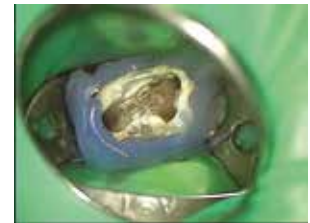

3. Parois dentinaires reconstruites



4. Isolation antérieure avant session restauratrice



5. Protection de la gencive marginale lors d'un traitement de blanchiment

> FABRICATION FRANÇAISE

Depuis 25 ans ELSODENT développe et fabrique, exclusivement en France, une gamme complète de produits dentaires haut de gamme, innovants et cliniquement performants, à la biocompatibilité améliorée. Un site unique, basé en Ile-de-France, intégrant les départements R&D, production et logistique.